

DÉTERGENT POUR LE RETRAITEMENT AUTOMATISÉ DES ENDOSCOPES

SOLUSCOPE™ ECL ENZYMATIC CLEANER

**DÉTERGENT POUR ENDOSCOPES FLEXIBLES.
À UTILISER EXCLUSIVEMENT AVEC
SOLUSCOPE SERIE 5 ET SERIE XS**

- Détergent mono-enzymatique
- Efficacité prouvée contre le biofilm et les protéines
- Conforme à la norme EN ISO 15883-4
- Compatible avec une large gamme d'endoscopes flexibles
- Système de bouchon sécurisé et canule intégrée au bidon



SOLUSCOPE™ ECL ENZYMATIC CLEANER

Détergent pour endoscopes flexibles. A utiliser exclusivement avec Soluscope Serie 5 et Serie XS



SOLUSCOPE SERIE 5



SOLUSCOPE SERIE XS

COMPOSITION DU PRODUIT

- Surfactants non ioniques
- Agents séquestrants
- Protéase
- Excipients

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Liquide jaune clair à ambré
- Densité à 20°C : 1,1 g/mL
- pH produit pur à 20°C : environ 10,1*
- pH dilué à 0,5 % : environ 7,5*
- Conductivité à 0,5 % : 552 µS/cm

*pH mesurés en condition d'usage à l'aide d'un pH-mètre avec compensation de température.

INFORMATIONS PRODUIT

PRODUIT	UNITÉ D'EMBALLAGE	CODE DE COMMANDE
Soluscope™ ECL Enzymatic Cleaner	2 x 5 L	3114542

MODE D'EMPLOI

- Visser le bouchon blanc connecté à votre Soluscope Laveur Désinfecteur sur le bidon (se référer au manuel d'utilisation du Laveur Désinfecteur)
- A utiliser dans les 2 mois après la date de connexion au Laveur Désinfecteur (inscrire la date d'ouverture sur l'étiquetage dans l'emplacement prévu à cet effet)
- S'assurer que l'évent n'est pas bouché
- Dilution automatique

CONDITIONS DE STOCKAGE

ATTENTION - respecter les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Dispositif Médical de Classe I.
Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.