

# Incidin™ Pro



## Geconcentreerd product voor een snelle en effectieve reiniging en desinfectie.

### Geconcentreerde vloeistof voor reiniging en desinfectie.

Dankzij de SMART-BALANCED formulering is Incidin™ Pro de nieuwe standaard voor reiniging en desinfectie van oppervlakken.

- Your Pro for efficacy
- Your Pro for speed
- Your Pro for compatibility

#### BREED WERKINGSSPECTRUM

Doeltreffend tegen bacteriën, gisten en verschillende virussen (inclusief norovirus), Incidin Pro is daarom geschikt voor gebruik in hoogrisicozones en voor de reiniging en desinfectie van diverse oppervlakken, gaande van algemene afdelingen en publieke ruimtes, tot in het operatiekwartier en de intensieve diensten.

#### UITSTEKENDE REINIGER EN VEILIG VOOR MATERIALEN

Uitvoerig getest op alle soorten oppervlakken in medische omgeving gaande van verschillende metaalsoorten, linoleum en PVC tot keramiek, rubber en kunststof.

#### ALDEHYDENVRIJ, ZONDER PARFUM - ZONDER KLEURSTOFFEN

De niet-vluchtige en geurvrije samenstelling zorgt voor een gemakkelijk en veilig gebruik van Incidin Pro.



# Incidin™ Pro

Geconcentreerde vloeistof voor reiniging en desinfectie.



Incidin™ Pro  
2 L fles



Incidin™ Pro  
6 L can

## Producteigenschappen

- helder kleurloos tot lichtgeel
- pH onverdund bij 20°C: ongeveer 11.0
- pH verdund met leidingwater (0.5%): ongeveer 9.5
- pH verdund met leidingwater (2.0%): ongeveer 10.0
- Dichtheid bij 20°C: 1.01 g/ml
- Brekingsindex: 1.385

## Microbiologische eigenschappen

Werkingspectrum/condities	Concentratie (%) / (ml/L)	Contacttijd
Bactericide volgens EN 13727 (0,25%, 5 min) / EN 16615 (1,5%, 5 min & 0,5%, 15 min)	1,5% / 15 0,5% / 5	5 min* 15 min*
Schimmeldodend volgens EN 13624 (0,25%, 5 min) / EN 16615 (1,5%, 5 min & 0,5%, 15 min)	1,5% / 15 0,5% / 5	5 min* 15 min*
Tuberculocide en mycobactericide volgens EN 14348	1,5% / 15	60 min*
Beperkt virucide werkings volgens EN 14476 (Adenovirus - Norovirus)	2,0% / 20 1,0% / 10	30 min* 60 min*
Actief tegen het Norovirus volgens EN 14476	1,5% / 15	30 min*
Werkzaam tegen omkapselde virussen volgens EN 14476	1,5% / 15 0,5% / 5	5 min* 30 min*

\*vuile condities, \*\* schone condities

## Verpakking en bestelinformatie

Product	Verpakking	Referentie
Incidin™ Pro	3 x 2 L fles	3148468 3148448 (NL)
Incidin™ Pro	6 L can	3140908 3148438 (NL)

**ECOLAB BV (België)**  
Noordkustlaan 16C  
1702 Groot-Bijgaarden  
Tel : 02 467 51 50

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

**ECOLAB BV (Nederland)**  
Oude Rhijnhofweg 17  
2342 BB Oegstgeest  
Tel : 071 524 12 00



**ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH**  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
Germany



## Indicaties

**Medical device:** geconcentreerde vloeistof voor het reinigen en desinfecteren van niet-invasieve medische hulpmiddelen.

**Biocide:** voor algemene oppervlakken.

## Gebruiksaanwijzing

**6L:** Verdun het concentraat met water (max. 60°C) tot de gewenste concentratie. Om bijvoorbeeld te verdunnen tot een concentratie van 0,5% (5 ml/l), voeg 40 ml toe voor 8 liter water. (5 ml/l), voeg 40 ml toe voor 8 liter water. Het oppervlak voldoende bevochtigen (+/- 30 ml/m<sup>2</sup>) dmv mechanische handeling (bijv. door vegen, dweilen).

Respecteer de aanbevolen contacttijd voor de vereiste antimicrobiële activiteit.

**2L:** Verdun het concentraat met water (max. 60°C) tot de gewenste concentratie. Om bv. te verdunnen tot een concentratie van 0,25% (2,5 ml/l) voor 8 liter de fles één keer rondraaien om een shot van 20 ml toe te voegen, voor 0,5% (5 ml/l) voor 8 liter de fles tweemaal rondraaien om toe te voegen twee shots van 20ml toe te voegen (in totaal 40ml). Het oppervlak voldoende bevochtigen (+/- 30 ml/m<sup>2</sup>) dmv mechanische handeling (bijv. door vegen, dweilen).

Respecteer de aanbevolen contacttijd voor de vereiste antimicrobiële activiteit.

## Samenstelling

100 g bevat: 10,0 g 2-fenoxyethanol (CAS-nr. 122-99-6), 8,0g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamine (Diamine) (CAS nr. 2372-82-9) en 7,5 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride (ADBAC/ BKC (C12-C16)) (CAS N°68424-85-1).

## Bewaren

Tussen 0°C en +25°C.  
Uit de buurt van zonlicht houden.  
Inhoud beschermen tegen vocht.

## Medisch hulpmiddel en biocide - veilig gebruiken

Lees het etiket en de productinformatie.



BIOCIDE BESTEMD VOOR OPPERVLAKKEN-DESINFECTIE (GROEP 1 - PT2).  
ALLEËN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

**ECOLAB**<sup>®</sup>  
PROTECTING WHAT'S VITAL™