

Aniosyme Synergy WD Plus



La force détergente pour votre stérilisation centrale

Détergent Mono-Enzymatique avec un fort pouvoir nettoyant

Aniosyme Synergy WD Plus est un produit de nettoyage liquide alcalin permettant de profiter du pouvoir nettoyant alcalin dans le retraitement automatisé des instruments. Il fournit d'excellentes performances de nettoyage grâce à sa formule mono-enzymatique spécialement développée, sans silicates, qui offre une grande compatibilité avec les matériaux.

- **PUISSANT** - Des performances de nettoyage élevées pour toutes les qualités d'eau, niveau de pH > 10
- **ENZYMATIQUE** - Efficace sur tous les types de salissures présentes sur la charge
- **EFFICACE** - Excellente efficacité dès la concentration proposée standard de 0,3%. Jusqu'au maximum 1% et peut être utilisé pour toutes les qualités d'eau



Aniosyme Synergy WD Plus

Détergent Mono-Enzymatique avec un fort pouvoir nettoyant



Aniosyme Synergy WD Plus
Bidon de 5 litres



Aniosyme Synergy WD Plus
Bidon de 20 litres

Puissant

Niveau de pH > 10,5 lors de la phase de nettoyage – répond aux exigences du RKI pour Creutzfeldt-Jacob (Institut Robert Koch – Allemagne).

Enzymatique

Élimination efficace de tous les types de salissures présentes sur la charge, grâce à la formule mono-enzymatique sans silicates spécialement développée et applicable à différentes concentrations.

Efficace

Excellente efficacité dès la concentration proposée standard de 0,3 %. Jusqu'au maximum 1 % et peut être utilisé pour toutes les qualités d'eau.

Données chimio-physiques

• Densité	20°C	1,152 g/mL
• Valeur pH* (concentré)	20°C	10,0
• Valeur pH* à 0,3 % (solution, 3 mL/L dans l'eau DI)	20°C	10,9
• Valeur pH* à 1 % (solution, 10 mL/L dans l'eau DI)	20°C	11,0
• Conductivité à 0,3 % (solution, 3 mL/L dans l'eau DI)	20°C	515 µS/cm
• Conductivité à 1 % (solution, 10 mL/L dans l'eau DI)	20°C	1412 µS/cm
• Viscosité (concentré)	20°C	< 15 mPa/s

*Mesurez toujours la valeur du pH dans les conditions opérationnels au moyen d'un pH-mètre avec compensation de la température.

Informations de commande

Produit	Emballage	Référence
Aniosyme Synergy WD Plus Bidon	2 x 5 L	3110180
Aniosyme Synergy WD Plus Bidon	20 L	3110200
Aniosyme Synergy WD Plus Fût	200 L	311210



ECOLAB BV

Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België

ECOLAB BV/SRL

Havenlaan 4,
Ravenshout Bed. 4.210,
3980 Tessenderlo
België



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

Application

Détergent mono-enzymatique concentré pour des instruments médicaux. Nettoyage du matériel chirurgical et médical, des dispositifs médicaux dans laveurs-desinfecteurs ainsi que dans les tunnels de lavage.

Mode d'emploi

- Solution concentrée pour usage professionnel
- S'utilise en machine à laver automatique et tunnel de lavage aux dilutions comprises entre 0,3 et 1,0 %. Si nécessaire, le dosage peut être augmenté jusqu'à 1 %
- Formule efficace dès 5 minute
- Ajustez la concentration, le temps de contact et la température de l'eau de dilution en fonction du degré de contamination, le programme de lavage, et le niveau de pH prévu pour la phase de nettoyage
- Température maximale: 60°C

Ingrédients

Tensioactifs, séquestrant, complexe enzymatique (protéase), excipients.

Stockage

Dangereux - respecter les instructions d'utilisation et l'étiquette du produit (établie conformément aux règles européennes en vigueur pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques). Stockage : entre +5°C et +25°C.

Certificats

Disponible sur demande.

Utilisation sécurisée des dispositifs médicaux

Veuillez vous référer à l'étiquette et la fiche technique du produit.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELLS.

ECOLAB
PROTECTING WHAT'S VITAL™